

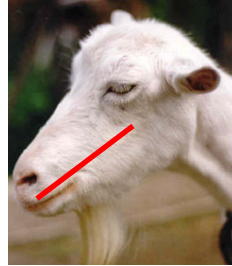
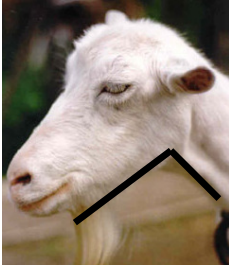


## Handleiding inbrengen van de Bolus

- Selecteer een dier dat voldoende groot is (geen kleine rassen) vanaf minimaal 25 kg kan de bolus ingebracht worden
- Check met een reader of er niet al een bolus in het dier zit.
- Fixeer het dier en houdt het hoofd in natuurlijke positie (90°)

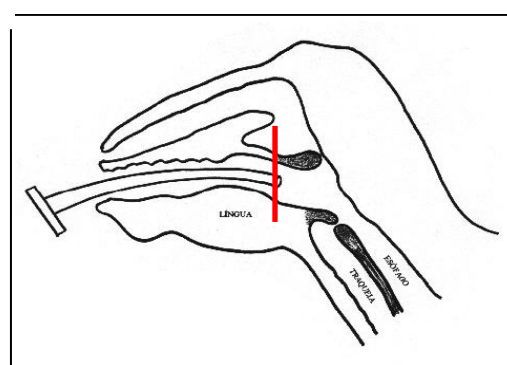

- Check de lengte van de bolus applicator ten opzichte van de grootte van het hoofd van het dier
- Open de mond van het dier voorzichtig door met de vingertoppen achter de snijtanden op het gehemelte te drukken
- Schuif de bolus applicator voorzichtig naar binnen tot het einde van de tong. **Duw nooit met kracht of onder dwang de bolus applicator naar binnen!!!!**
- Druk op het handvat om de bolus in te brengen (Je kunt de bolus aan de linker halszijde naar beneden zien zakken).
- Als de bolus in de bek blijft zitten (dier heeft niet geslikt) rustig wachten tot dat het dier de bolus uitspuugt.
- Eventueel kan de bolus na het inbrengen met een handreader uitgelezen worden aan de linker zijde van het dier.
- Merk het dier zodat er geen tweede bolus ingebracht wordt

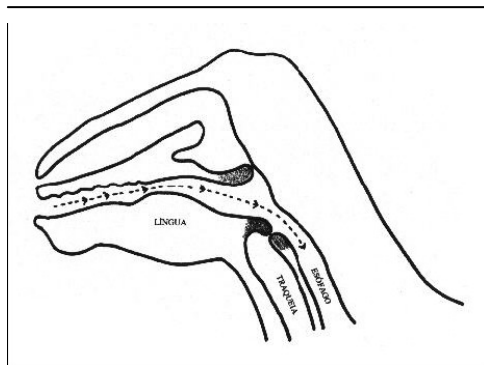

Voor het inbrengen van het oormerk zie de handleiding van het verkregen oormerk. Het ELDA SG oormerk kan onder andere met onderstaande tang en de juiste punt worden ingebracht.

