

Hoe inbrengen ELDA Clip oormerken

Tip: Oormerken altijd op kamertemperatuur bewaren

1. Plaatsen en losmaken van het oormerk in de tang.

- 1.1. Plaats het vrouwelijke deel van het oormerk in het lange witte deel van de tang. (onderkant Afbeelding 1)
- Let op dat het vrouwelijke deel vastklikt in de tang.
 - Het mannelijke deel verschuift in de vorm als de tang ingeknepen wordt. (Afbeelding 2)




Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

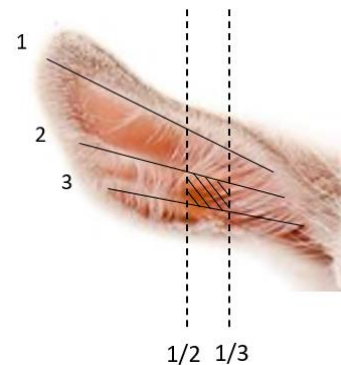

2. Het oormerk inknippen.

2.1 Plaats in het oor

- Het ministerie adviseert het linkeroor voor het elektronisch oormerk te gebruiken (Gezien vanaf de achterkant van het dier)
- Plaats het oormerk in het gearceerde gebied in de afbeelding (afbeelding 3)
- De voorkeur van het plaatsen van het oormerk is tussen de 2^e en 3^e nerf in de oorschelp.
- De voorkeur van het plaatsen t.o.v. de kop is tussen 1/2 en 1/3 afstand
- Zorg dat de buitenkant van het oormerk niet de vouw/ rand van het oor kan irriteren.
- Het makkelijkste is de geit/oor van onderen te benaderen.

Let op: Omdat de ELDA Clip beugeltjes zijn is het erg belangrijk dat ze ver genoeg naar de rand worden ingebracht zodat het oor voldoende ruimte heeft om te groeien. Per ras kan de juiste plaatsing ook nog van belang zijn.

2.2 Wijze van aanbrengen

- Zorg dat het oor schoon en droog is
- Eventueel het oormerk ontsmetten met niet-agressief ontsmettingsmiddel
- Het mannelijk deel komt aan de buitenzijde van het oor, de pen wordt dus vanaf de achterzijde van het oor ingebracht

Mannelijk deel

Vrouwelijk deel



Nazorg: Hou de wond goed in de gaten. Verwijder na een paar dagen de droge korsten rond de wond. De wond in het oor kan dan beter drogen aan de lucht, zo geneest het sneller. Eventueel kunt u gebruik maken van een ontsmettende spray of poeder.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. ©Elda, 2023