
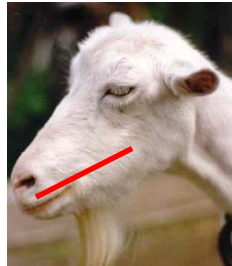




## Handleiding inbrengen bolus

Breng een bolus in bij een dier dat voldoende groot is (geen kleine rassen zoals dwerggeit of ouessant). Vanaf minimaal 25 kg kan de bolus ingebracht worden.

- Check met een reader of er niet al een bolus in het dier zit.
- Fixeer het dier en houdt het hoofd in natuurlijke positie (90°)

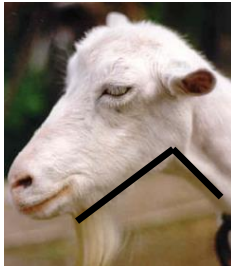

- Check de lengte van de bolus applicator ten opzichte van de grootte van het hoofd van het dier.
- Open de mond van het dier voorzichtig door met de vingertoppen achter de snijtanden op het gehemelte te drukken.
- Schuif de bolus applicator voorzichtig naar binnen tot het einde van de tong. **Duw nooit met kracht of onder dwang de bolus applicator naar binnen, je hebt dan kans dat de bolus in de longen komt te zitten!!!**
- Knijp in het handvat om de bolus in te brengen (Je kunt de bolus aan de linker halszijde naar beneden zien zakken).
- Als de bolus in de bek blijft zitten (dier heeft niet geslikt) rustig wachten tot dat het dier de bolus uitspuugt.
- Eventueel kan de bolus na het inbrengen met een handreader uitgelezen worden aan de linker zijde van het dier.
- Geef het dier een kleur zodat er geen tweede bolus ingebracht wordt.

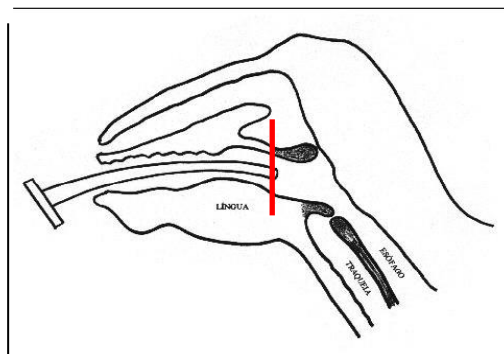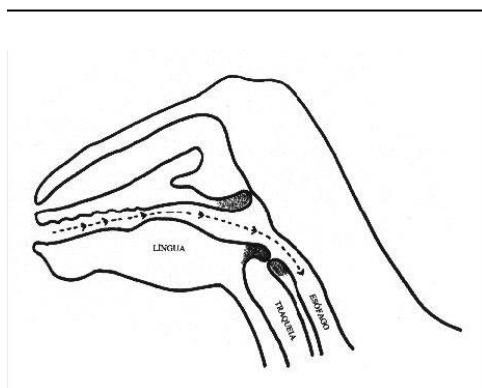

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. ©Elda, 2023